



CARY Base

Notendahandbók

Art. nr: 508900

Hugbúnaðarútgáfa 1.3.0 eða nýrri

IS 4.0

Efnisyfirlit

Kynning	4
Um CARY Base	4
Fyrirhuguð notkun	4
Um þessa handbók	4
Yfirlit yfir CARY Base	5
Hefjast handa með CARY Base	6
Staðsetja CARY Base á heimilinu	6
Ræsa CARY Base	6
Setja upp CARY Base	6
Notkun CARY Base	7
Nota aðalsýn	7
Nota áminningar	7
Hljóðstyrk talstuðnings breytt	7
Dagshlutar	8
Persónusníða CARY Base	8
Fara í ræsivalmynd	8
Breyta stillingunum	9
Veldu skjáupplýsingarnar	10
Stjórna dagatalinu	12
Tengja ytri búnað	15
Viðhald	16
Leit að nýjum forritsútgáfum	16
Endurstíllt CARY Base á verksmiðjustillingar	16
Prif á CARY Base	16
Bilanaleit	17
Geymsla og förgun	18
Tækniupplýsingar vöru	19
Mikilvægar upplýsingar	20
Hafðu upplýsingar	23

Kynning

Um CARY Base

CARY Base er dagatalsklukka fyrir einstaklinga sem þurfa aðstoð við að fylgjast með tímanum og við að muna hluti. Skjárinn sýnir dagsetningu, vikudag, tíma og hvort það er morgunn, dagur, kvöld eða nótt. Þú getur látið lesa upplýsingarnar upphátt með því að ýta á skjáinn eða með því að nota stýrirofa.

Hægt er að sýna daglegar athafnir notanda á skjánum og gefa persónulegar áminningar á æskilegum tímum. Dagatlinu er stýrt beint á tækinu eða fjarstýrt í gegnum vefþjónustuna myAbilia.


Hægt er að draga úr fjölda upplýsinga á skjánum og tungumálið má stilla á þau mörgu tungumál sem eru í boði, svo að það henti þörfum notanda.

Fyrirhuguð notkun

CARY Base er dagatalsklukka sem er ætlað að vera stuðningur fyrir þá einstaklinga sem eru með skerðingar í tímaskynjun og minni.


CARY Base er ætlað til notkunar innadyra í heimilisumhverfi.

Um þessa handbók

 Áður en þú notar vöruna skaltu lesa mikilvægar upplýsingar um on page 20.

Í þessu skjali lærir þú hvernig á að ræsa CARY Base og sérsníða fyrir einstaklinginn sem á eftir að nota vöruna.

Yfirlit yfir CARY Base

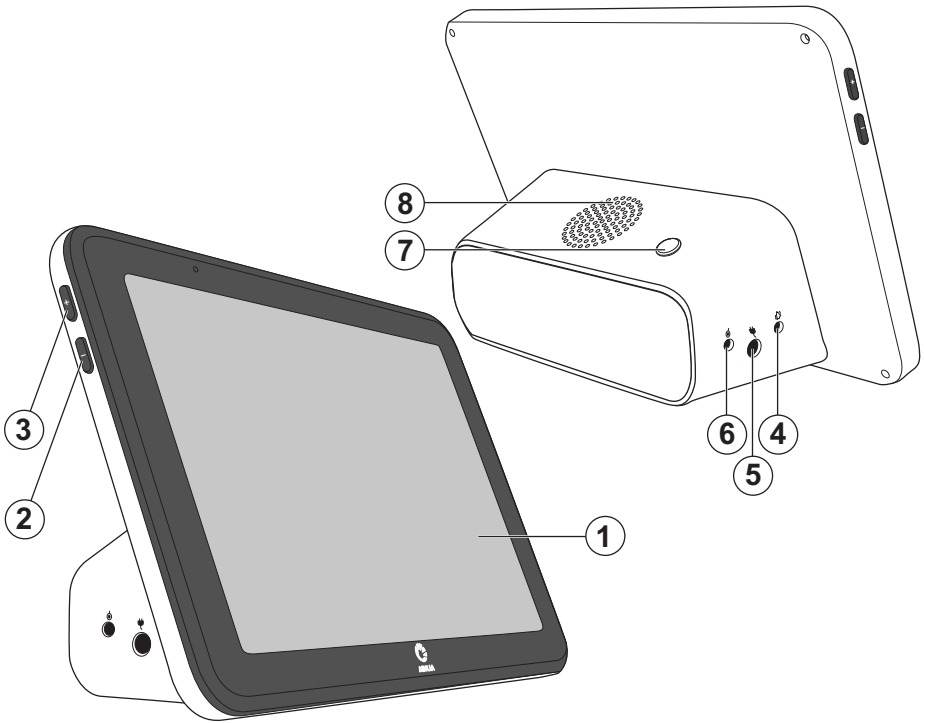

1. Snertiskjár
2. Hljóðstyrkur -
3. Hljóðstyrkur +
4. Rafliðaúttak til að áframsenda áminningarmerki
5. Rafmagnstengill
6. Tengi fyrir rofainntak (aukahlutur)
7. Aflhnappur
8. Hátalari

Varahlutir sem fylgja með

- CARY Base
- Spennubreytir

Meðfylgjandi skjöl


- Notendahandbók (þetta skjal)

Hefjast handa með CARY Base

⚠ VIÐVÖRUN: Notaðu ekki CARY Base þegar varan er skemmd.



Staðsetja CARY Base á heimilinu


Ákveddu hvar skuli staðsetja CARY Base á heimilinu. Finndu því stað þar sem það sést auðveldlega, eins og á eldhúsborðinu. Passaðu að engin endurspeglun sé af neinum ljósum eða gluggum á skjánum.

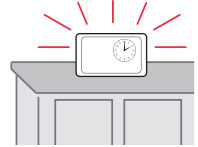

Ræsa CARY Base

⚠ VIÐVÖRUN: Notaðu aðeins spennubreytinn sem fylgir með CARY Base.

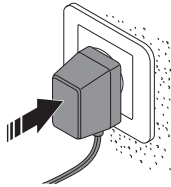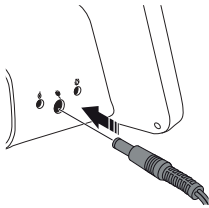

1. Tengdu tengið við rafmagnstengilinn, sem er merktur með .
2. Tengdu spennubreytinn við innstungu.

Setja upp CARY Base

Við ræsingu á CARY Base í fyrsta skiptið færðu leiðbeiningar um að stilla tungumál, dagsetningu og tíma. Ef þú vilt geturðu líka breytt upplýsingunum sem eru sýndar á skjánum.


Nánari upplýsingar er að finna í *Breyta stillingunum* on page 9.

Notkun CARY Base

⚠ VIÐVÖRUN: Notaðu ekki CARY Base þegar varan er skemmd.

Nota aðalsýn

- Sjá dagsetningu og tíma dagsins í dag á skjánum.
- Sjá athafnir dagsins í dag.
Þetta er aðeins í boði þegar Dagsáætlun er virkjuð í stillingunum.
- Ýttu á skjáinn til að heyra upplýsingar.
Þetta er aðeins í boði þegar valið tungumál er með talstuðning og hann hefur verið gerður virkur í stillingunum.

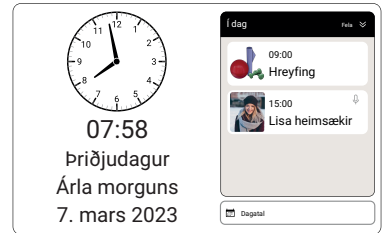

Nota áminningar


Áminning er sýnd þegar athöfn hefst. Ef þú lokar áminningunni ekki lokast hún sjálfkrafa eftir 30 mínútur.

- Ýttu einhvers staðar á skjáinn til að stöðva áminningarkerkið.
- Ýttu á Spila til að endurtaka skilaboð áminningar.
- Ýttu á Í lagi til að loka áminningunni.



Hljóðstyrk talstuðnings breytt

Hljóðstyrk talstuðnings er breytt með + og - hnöppunum á hliðum CARY Base.

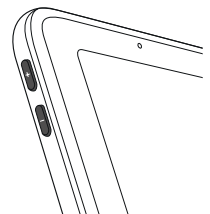

Dagshlutar

CARY Base sýnir hluta dagsins samkvæmt dagshlutum. Hægt er að breyta dagshlutum, sjá *Breyta stillingunum* á síðu 9.

Dagshlutarnir eru forritaðir fyrirfram á eftirfarandi hátt:

- Árla morguns: 06:00–10:00
- Um miðjan morgun: 10:00–12:00
- Eftir hádegi: 12:00–17:00
- Kvöld: 17:00–22:00
- Nótt: 22:00–06:00


Á nóttunni er sjálfkrafa dregið úr skjábirtunni. Ef stillt er á dökkan bakgrunn er bakgrunsliturinn dökkur á nóttunni.

ÁBENDING: Hægt er að slökkva á skjánum með því að ýta á aflhnappinn. Skjárinn lýsist upp við áminningar.


Persónusníða CARY Base

Fara í ræsivalmynd

Ræsivalmyndin gefur þér aðgang að Stillingum og Dagatali. Þú getur líka slökkt á CARY Base úr þessari valmynd.

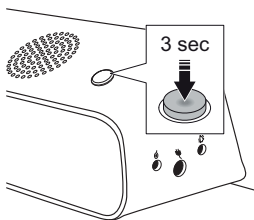


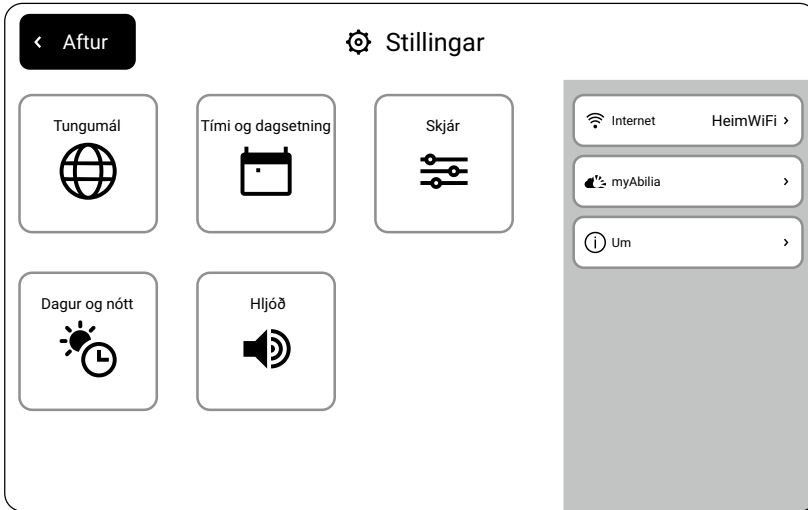
1. Ýttu á ræsihnappinn og haltu honum.

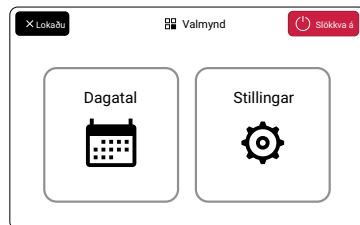



2. Ræsivalmyndin opnast.


Breyta stillingunum


Til að breyta stillingunum á CARY Base er farið í ræsivalmyndina og ýtt á .





 **Tungumál**
Veldu tungumál. Tungumál merkt með  eru með talstuðning.

 **Tími og dagsetning**
Stilltu dagsetningu og tíma.


 **Skjár**
Sjá *Veldu skjáupplýsingarnar* á síðu 10.


 **Dagur og nótt**
Breyttu dagshlutunum, stilltu skjábertuna og kveiktu á dökkum bakgrunni.

 **Hljóð**
Aðlagaðu talstuðninginn og áminningarkerkið.

 **Internet** (valkvætt)
Tengdu við internetið til að:


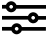
- Fá dagsetningu og tíma sjálfvirk.
- Notaðu myAbilia.

 **myAbilia** (valkvætt)
Fjaruppfæra dagatalið, sjá *Fjaraðstoð í gegnum myAbilia* á síðu 14.


 **Um**
Sjá *Leit að nýjum forritsútgáfum* á síðu 16.


DÆMI: Stilltu upphafstíma fyrir morgun á tímum sem þú vaknar yfirleitt.

Veldu skjáupplýsingarnar


Til að velja hvaða upplýsingar séu sýndar á skjánum skal fara í ræsivalmyndina og ýta á , ýta síðan á .





 **Stafræn klukka**
Sýna eða fela stafræna klukku.


 **Hliðræn klukka**
Sýna eða fela hliðræna klukku.

 **Mínútur**
Sýna eða fela mínútumerkin.

 **Vikudagur**
Sýna eða fela dag vikunnar.

 **Hluti af deginum**
Sýna eða fela hluta dags, eins og morgun eða kvöld. Dagshlutarnir eru stilltir í Dagur og nótt, sjá *Breyta stillingunum* á síðu 9.

 **Dagsetning**
Sýna eða fela dagsetningu.

 **Dagsáætlun**
Sýna eða fela dagsáætlun með athöfnum dagsins í dag.



Dagatal

Sýna eða fela hnappinn
Dagatal, sjá *Stjórná*
dagatalinu á síðu 12.



Daglitir



Sýna eða fela daglitina í
dagsáætluninni og dagatali.

ÁBENDING: Þegar þú dregur úr fjölda upplýsinga á skjánum verður
CARY Base enn einfaldra og skýrara.

Stjórna dagatalinu

VIÐVÖRUN: Notaðu ekki CARY Base sem eina stuðninginn fyrir lyfjagjöf, lyfjameðferð eða aðrar mikilvægar athafnir.


Uppfæra dagatalssýn


Til að uppfæra dagatalið skal fara í ræsivalmyndina. Ýttu á  og síðan á  eða ýttu á hnappinn Dagatal í Aðalsýn (ef hún er til staðar).


Hér er allar athafnirnar skráðar í tímaröð á hvern dag. Strikað er yfir liðnar athafnir á listanum.



 **Velja dag**
Ýttu á dag til að sjá athafnir hans.

 **Dagsáætlun**
Gefur til kynna hvort athöfnin sé sýnd í Dagsáætlun.

 **Vikan á undan**
Farðu í vikuna á undan.

 **Bæta athöfn við**
Sjá **Bæta athöfn við** á síðu 13.

 **Næsta vika**
Farðu í næstu viku.

Til að breyta eða eyða athöfn, sjá **Breyta eða eyða athöfn** á síðu 14.

ÁBENDING: Takmarkaðu fjölda afhafna í dagsáætlun til að leggja áherslu á athafnir sem eru afar mikilvægar fyrir notandann.


Bæta athöfn við

Til að bæta athöfn við skal fara í Dagatal, sjá *Fara í ræsivalmynd* á síðu 8.

Nafn Nafnið sem er sýnt í dagsáætluninni. Hafðu það lýsandi og stutt.


Lýsing Viðbótarupplýsingar sem eru sýndar í áminningunni.


 **Dagsetning**
Dagsetning athafnar.


 **Tími**
Tíminn þegar athöfnin hefst.


 **Endurtekning**
Ef og hvernig athöfnin er endurtekin.

DÆMI: Dagleg ganga með hundinn eða afmæli einu sinni á ári.

 **Sýna í dagsáætlun**
Ef athöfn er sýnd á dagsáætlun dagsins eða aðeins sem áminning.

 **Spilaðu texta við vekjara**
Nafnið og lýsingin eru lesin upphátt þegar áminningin hefst.

 **Taktu upp skilaboð**
Skilaboðin spilast þegar áminningin hefst. Þetta er ekki hægt þegar stillt er á Spila texta.

 **Bæta við mynd**
Veldu mynd úr safninu til að sjóngera athöfnina. Til að nota þínar eigin myndir, sjá *Fjaraðstoð í gegnum myAbilia* á síðu 14.

Breyta eða eyða athöfn

Til að breyta eða eyða athöfn skal fara í Dagatal, sjá *Fara í ræsivalmynd á síðu 8*. Ýttu á athöfnina sem þú vilt breyta eða eyða.

✕ Hætta við
✎ Breyta virkni
✓ Vista

Mynd



↻ Breyting

📌 Fjarlægðu

Titill

Hádegismatur >

Lýsing

Taktu kreditkortid þitt með þér. >

📎 Taktu upp skilaboð
0:23 sec >

Dagsetning **07-03-2023** >


Tími **11:45** >


Endurtekning **Single** >


Sýnið í dagsplani

abc) Spilaðu texta við vekkjara

🗑️ Eyða


 **Breyting**
Breyttu núverandi mynd.



 **Eyða**
Eyddu athöfninni.

 **Fjarlægðu**
Fjarlægðu núverandi mynd.

Fjaraðstoð í gegnum myAbilia

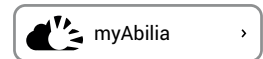Með myAbilia geturðu uppfært dagatalið fjarstýrt og bætt við myndum í myndasafnið.






Til að setja upp tengingu á milli CARY Base og myAbilia skal fara í ræsivalmyndina, ýta á  og ýta síðan á . Fylgdu leiðbeiningunum sem eru sýndar á skjánum.

Ef þú ert ekki með myAbilia notendareikning geturðu stofnað hann á myabilia.com. Þú þarft tölvupóst til þess.

Tengja ytri búnað

Hægt er að tengja eftirfarandi ytri búnað við CARY Base:

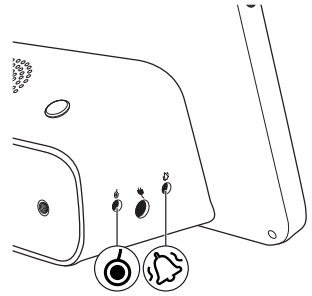

- *Stýrirofi*
Notað í stað þess að ýta á skjáinn. Til dæmis til að fá raddstuðning eða til að slökkva á áminningum. Tengdu stýrirofann við  innstunguna .
- *Búnaður til að áframsenda áminningarkerki*
Til dæmis titringsmerki eða gaumljós. Tengdu búnaðinn við rafliðaúttakið .



Hafðu samband við söluaðila vöru vegna ráðlegginga um ytri búnað, sjá www.abilia.com/en/abilias-world/distributors.



Viðhald

Leit að nýjum forritsútgáfum

1. Farið í Ræsivalmynd.
2. Ýttu á .
3. Ýttu á .
4. Ýttu á Leita að uppfærslum.
5. Ef ný útgáfa er til staðar skal ýta á Uppfæra.

Endurstillt CARY Base á verksmiðjustillingar

Þú gætir þurft að endurstilla CARY Base þegar varan er hreinsuð eða þegar vandamál eru bilanaleituð. Þegar verksmiðjustillingar eru endurheimtar fjarlægir það allar stillingar og persónuupplýsingar.

1. Farið í Ræsivalmynd.
2. Ýttu á .
3. Ýttu á .
4. Ýttu á Verksmiðjustillingu.

Þrif á CARY Base

Þrifið CARY Base með rökum klút með mildu hreinsiefni.

CARY Base má hreinsa með alkóhóli.

Bilanaleit

Ef þú þarft aðstoð með CARY Base skal sjá *Hafðu upplýsingar* á síðustu blaðsíðu þessarar notendahandbókar eða fara á www.abilia.com/intl/manuals.

Vandamál	Orsök	Lausn
Stíllt áminning fer ekki í gang.	Ekki er kveikt á tækinu.	Sjá leiðbeiningarnar í <i>Ræsa CARY Base</i> á síðu 6.
	Hljóðstyrkur áminningar er stilltur á 0.	Auktu hljóðstyrk áminningarinnar, sjá <i>Breyta stillingunum</i> á síðu 9.
Klukkan sýnir rangan tíma.	Klukkan er ekki samstillt.	Tengdu við internetið.
		Stílltu tímann handvirkt, sjá <i>Breyta stillingunum</i> á síðu 9.
Skjábirtan er of mikil á nóttunni.	Ekki er kveikt á stillingum á dökkum bakgrunni.	Kveiktu á dökkum bakgrunni, sjá <i>Breyta stillingunum</i> á síðu 9.
Skjárinn lýsist of snemma upp.	Dagshlutarnir eru ekki stilltir á réttan hátt.	Breyttu dagshlutunum, sjá <i>Dagshlutar</i> á síðu 8.
Ég get ekki tekið upp skilaboð fyrir athöfn.	Stillingin Spila texta við hringingu er stillt á On.	Stílltu Spila texta við hringingu á Off í athöfninni.
Ég get ekki leitað að uppfærslum.	CARY Base er ekki tengt við internetið.	Tengdu við internetið, sjá <i>Breyta stillingunum</i> á síðu 9.
Varan virkar ekki á réttan hátt.		Slökktu á CARY Base og ræstu hana aftur, sjá <i>Fara í ræsivalmynd</i> á síðu 8.
		Endurstílltu aftur á verksmiðjustillingar, sjá <i>Endurstíllt CARY Base á verksmiðjustillingar</i> á síðu 16.
		Hafðu samband við aðstoð.

Geymsla og förgun

Varan skal geymd innandyra við stofuhita og frá raka.

ATH.: Slökktu á CARY Base áður en rafmagnssnúran er fjarlægð.

Til að slökkva á CARY Base skal fara í ræsivalmyndina og ýta á .

CARY Base geymir stillingarnar í um það bil eitt ár. Ef CARY Base er í geymslu í lengri tíma en það verður að endurstilla.



Varan inniheldur rafmagns hluti sem verður að endurvinna. Farga skal vörinni á viðeigandi endurvinnslustöð.

Tækniupplýsingar vöru

CARY Base

Mál, H x B x D	137 x 207 x 74 mm
Þyngd	520 g
Skjár	8" með 1280 x 800 upplausn
Aflgjafi	5V 2A
Orkunotkun	Hám. 10 W
Vararafhlaða	1x CR2032 3V og 1x 2000mAh 3,7V
Hátalari	Hám. 82dB í 1 metra fjarlægð
Netkerfi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 / 5 GHz
Bluetooth®	Bluetooth v4.2
Stýrikerfi	Android 8.1
IP-flokkur	IP31
Umhverfisleg skilyrði fyrir notkun	+5 °C – +35 °C. 90% rakastig að hámarki
Tengi fyrir rofainntak	3,5 mm
Rafliðaúttak til að áframsenda áminningarmerki	3,5 mm
Áætlaður líftími	5 ár

Aukabúnaður

CARY Base er með eftirfarandi aukabúnað í boði:

- Spennubreytir
- Ytri rofar

Nánari upplýsingar um CARY Base og aukahluti er að finna á www.abilia.com eða með því að skanna QR-kóðann.



Skannaðu mig!

Mikilvægar upplýsingar

Áður en þú notar vöruna verður þú að lesa og skilja innihald þessa notendahandbókar.

Öryggisskilgreiningar

⚠ VIÐVÖRUN: Hætta á meiðslum eða dauða ef leiðbeiningum er ekki fylgt.

⚠ VARÚÐ: Hætta á skemmdum á vöru ef leiðbeiningum er ekki fylgt.

ATH.: Upplýsingar sem eru nauðsynlegar í tilteknum aðstæðum.

ÁBENDING: Viðbótarupplýsingar sem geta bætt notkun vörunnar.

Öryggisleiðbeiningar fyrir notkun CARY Base

⚠ VIÐVÖRUN: Lestu eftirfarandi viðvaranir áður en þú notar vöruna.

- Notaðu aðeins spennubreytinn sem fylgir með CARY Base.
- Notaðu ekki CARY Base sem eina stuðninginn fyrir lyfjagjöf, lyfjameðferð eða aðrar mikilvægar athafnir.
- Notaðu ekki CARY Base þegar varan er skemmd.

Alvarleg atvik

Ef alvarleg atvik koma upp í tengslum við vöruna, skal tilkynna það framleiðanda og lögbæru yfirvaldi þíns lands. Alvarlegt atvik leiðir, getur leitt eða getur hafa leitt, beint eða óbeint, til dauða sjúklings, notanda eða annars einstaklings; stuðlað að tímabundinni eða langvarandi afturför á heilsufari notanda eða annars einstaklings; eða verið alvarleg ógn við lýðheilsu.

Samræmi við kröfur um lækningatæki

CARY Base er markaðssett sem hjálpartæki fyrir fólk sem hefur fötlun. Það er í samræmi við allar nauðsynlegar kröfur, reglugerðir og tilskipanir fyrir lækningatæki.

Skaðsemisábyrgð

Varan er þróuð og áhættumetin í samræmi við ISO 14971. Handbókin og tækniupplýsingar eru gerðar í samræmi við öryggismat í áhættugreiningu. Öryggi verður alltaf að hafa í huga við notkun þessarar vöru. Abilia AB gengst ekki undir ábyrgð vegna hvers konar rangri notkun eða uppsetningu á vörunni. Hverskyns skemmdir eða breytingar á vörunni ógildir ábyrgðina og afsalar framleiðandann skaðabótaábyrgð. Áætlaður endingartími vörunnar á við þegar varan er notuð í samræmi við tilætlaða notkun og viðhaldsleiðbeiningar.

Hafðu upplýsingar

Svíþjóð

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Svíþjóð
Sími +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Noregur

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Noregur
Sími +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Bretland

Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Bretland
Sími +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

Alþjóðleg

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

