

CaryBase

LEIÐBEININGAR VIÐ UPPSETNINGU



1

Tengið tækið við rafmagn og smelltu á hnappinn fyrir aftan skjáinn.

Mikilvægt er að staðsetja tækið á áberandi stað innan heimilisins þar sem notandi sér tækið vel og ítrekað í daglegu lífi.



2


Veljið tungumál og fylgið sjálfvirkri uppsetningarferli, ef tengja á tæki við myAbilia reikning þarf að tengja tækið við WiFi.



3

Valkvætt

Tenging við myAbilia
Smellið á "Create account"
og stofnið reikning eftir
leiðbeiningum. Þá er hægt að
skrá sig inn á heimasíðunni
myabilia.com og stofna
viðburði þar sem skila sér
sjálfkrafa í tækið.

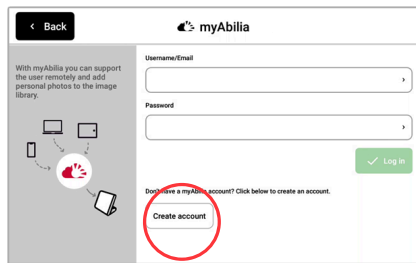

CaryBase

LEIÐBEININGAR V. VIÐBURÐI

Stofna viðburð í tæki

1. Haldið inni takka aftan á tæki í 3 sek.
2. Velja Dagatal
3. Velja +Nýtt
4. Fylla út upplýsingar um viðburð

Stofna viðburð á vefgátt

1. Innskráning á myabilia.com með farsíma eða tölvu
2. Velja +New Activity eða smella á dagatal
3. Fylla út upplýsingar um viðburð

Einnig er hægt að nálgast myndband á heimasíðu:

oryggi.is undir Minnistækni og CaryBase.

Almennar upplýsingar

- Tækið verður alltaf að vera í sambandi.
- Mikilvægt er að tækið sé tengt við WiFi ef nýta á vefgátt.
- Til að eiga við tækið/opna "Stillingar" eða "Dagatal" þarf að halda takkanum aftan á tækinu inni í 3 sek.
- Sjá nánari upplýsingar um hvernig stofna á viðburði á heimasíðu.

